

Uroflowmetr DANFLOW 3000

Instalační postup

1. Přístroj je dodáván ve vypnutém stavu. Před započítím instalace prosím zapněte přístroj vypínačem na spodní straně uroflowmetru. Po uvedení do provozu může přístroj zůstat zapnut trvale.
2. Připojte rádiový USB adaptér do USB konektoru. Rádiový adaptér může být připojen přes USB Hub.
Systém se následně pokusí nainstalovat ovladače. V závislosti na nastavení Vašeho počítače mohou být ovladače vyhledány automaticky, popřípadě si je může systém vyžádat. V takovém případě jej nasměrujte do adresáře ***Drivery*** na dodaném instalačním médiu (USB flash disku nebo CD-ROM). Instalujete-li přístroj DANFLOW 3000 na počítač s operačním systémem Windows XP, použijte prosím ovladač z adresáře ***Drivery / CDM v2.08.30 WHQL Certified for Windows XP***.
3. Spusťte hlavní instalační program (soubor ***Setup_Danflow3000_CSY_1.37.exe***) z dodaného instalačního média (USB flash disku nebo CD-ROM).
Pokračujte podle pokynů instalačního programu.

Po úspěšném dokončení instalace je možné začít přístroj ihned používat.

Doporučujeme ale provést kalibraci přístroje dle postupu uvedeném v Uživatelském manuálu v kapitole ***Kalibrace snímače***.